


Stimulan Rapid Cure Mischanleitung - Vancomycin

Vorsicht: Keine anderen Flüssigkeiten als die beigegefügte Flüssigkeit verwenden!

5cc Stimulan: Vancomycin (Pulverform) 500mg



10cc Stimulan: Vancomycin (Pulverform) 1000mg

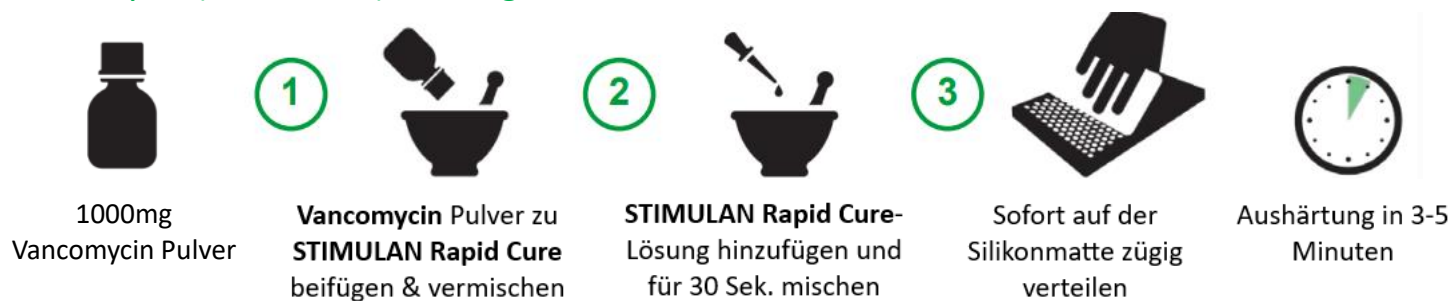


20cc Stimulan: Vancomycin (Pulverform) 2000mg




Stimulan Rapid Cure Mischanleitung - Gentamicin

Vorsicht: Bei Antibiotika in flüssiger Form die beigegefügte Flüssigkeit **nicht** verwenden!


5cc Stimulan: Gentamicin (flüssig) 120mg




1,5 Amp. á 80mg/2ml
Gentamicin (3ml)

1 


3ml Gentamicin in einer
Spritze aufziehen

2 

Gentamicin zu **STIMULAN Rapid
Cure** Pulver hinzufügen und für 30
Sekunden gut mischen


3 

Sofort auf der
Silikonmatte zügig
verteilen




Aushärtung in 3-5
Minuten


10cc Stimulan: Gentamicin (flüssig) 240mg




3 Amp. á 80mg/2ml
Gentamicin (6ml)

1 


6ml Gentamicin in
einer Spritze aufziehen

2 

Gentamicin zu **STIMULAN Rapid
Cure** Pulver hinzufügen und für 30
Sekunden gut mischen


3 

Sofort auf der
Silikonmatte zügig
verteilen




Aushärtung in 3-5
Minuten


20cc Stimulan: Gentamicin (flüssig) 480mg




6 Amp. á 80mg/2ml
Gentamicin (12ml)

1 


12ml Gentamicin in
einer Spritze aufziehen

2 

Gentamicin zu **STIMULAN Rapid
Cure** Pulver hinzufügen und für 30
Sekunden gut mischen

3 

Sofort auf der
Silikonmatte zügig
verteilen



Aushärtung in 3-5
Minuten